


サークル 1日使い捨てコンタクトレンズ

# フレッシュルック® デイリーズ® イルミネート® (5色)

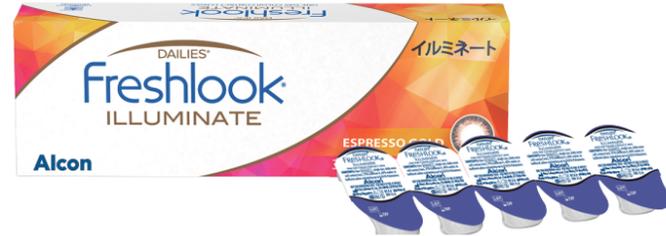

## レンズの特徴

- 色素がレンズの内側に埋め込まれ、直接目に色素が触れないレンズ構造
- 複数のカラーリングを組み合わせることで、奥行きのある立体感と瞳に自然になじむ色を実現
- 含水率69%のうるおう素材「PVA」
- タンパク質などがつきにくい非イオン性素材

## 基準データ

USAN	nelfilcon A	含水率	69%
素材	PVA(ポリビニルアルコール)	製造方法	モールド製法(ライトストリーム®レンズテクノロジー)
ソフトコンタクトレンズ分類	グループII(非イオン・高含水)	リング部の色	エスプレッソゴールド/ダイヤモンドブラック/ジェットブラック/リッチブラウン/ライトブラウン
酸素透過係数(Dk <sup>*1</sup> )	26×10 <sup>-11</sup>	中心厚	0.10mm(-3.00Dの場合)
酸素透過率(Dk/t <sup>*2</sup> )	26×10 <sup>-9</sup>	刻印	なし

## レンズ制作範囲


\*-0.25Dはジェットブラック、リッチブラウン、ライトブラウンのみのご用意  
 \*トライアルレンズ: 0.00D、-3.00D、-6.00Dのみ

ベースカーブ	8.6mm
球面度数	0.00D ~ -8.00D 0.25D間隔 (0.00D ~ -6.00D) 0.50D間隔 (-6.00D ~ -8.00D)
直径	13.8mm
着色部外径	エスプレッソゴールド/ダイヤモンドブラック: 13.2mm ジェットブラック/リッチブラウン/ライトブラウン: 12.6mm

## 包装


製品	30枚入	トライアルレンズ	10枚入
----	------	----------	------

## 処方手順

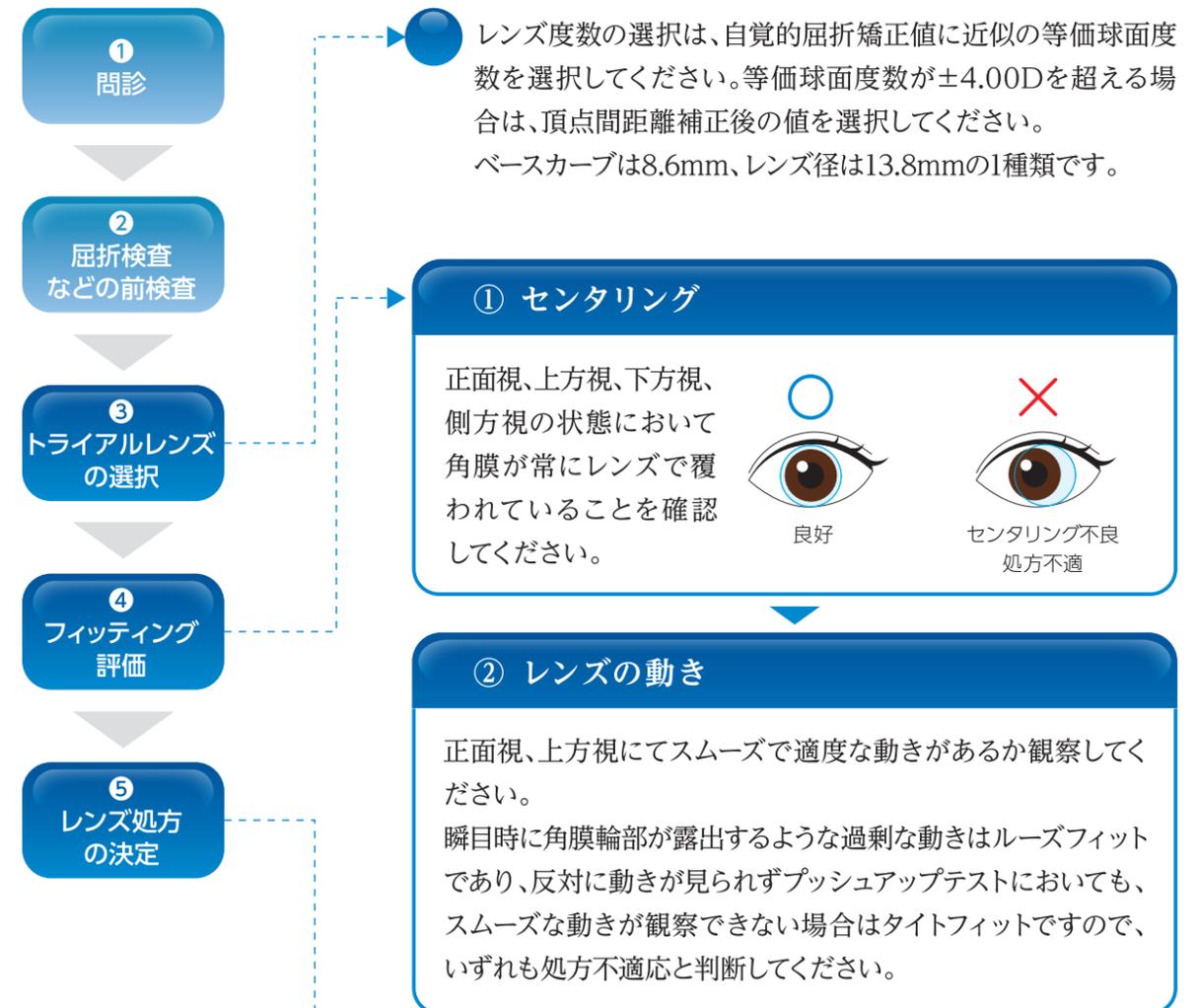

## ▶ プッシュアップテスト

正面視させ、下眼瞼縁を指で押し上げレンズを上方に動かしたあとのレンズの動きを確認する方法。レンズがスムーズに動かない場合はドロップアウトとなります。

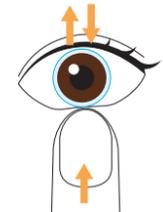

適正なフィッティングが得られていることを確認後、追加補正により、レンズ度数を決定してください。

※1 (cm<sup>2</sup>/sec) · (mLO<sub>2</sub>/mLxmmHg)    ※2 (cm/sec) · (mLO<sub>2</sub>/mLxmmHg)